



Five-layer filter



Skin-friendly fabric



Health and Safety



FFP2 protection

Προστατευτική μάσκα προσώπου με φίλτρο προστασίας FFP2 NR



0370

> με αφρώδες κάλυμμα για άνεση & εφαρμογή στη μύτη

COVER PROTECT!

ΑΙΣΘΑΝΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ

Lot No. 2022-01-05
Ημ. Λήξης 2025-01-04



ΜΗΝ ΤΗΝ ΤΡΕΝΕΤΕ



ΜΗΝ ΤΗΝ ΣΑΝΑΡΧΕΙΟΜΟΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ



5 201507 916121

Παράρτημα στην Αθήνα
ITEM No. 6121

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Με πέντε στρώσεις προστασίας, σύμφωνα με το πρότυπο EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR.
INGREDIENT CONTENT: Nonwovens 45%, Melt Blown 37.5%, Hot Air Cotton 17.5%.

PRODUCT COMPOSITION: Nonwoven fabric & Melt blown fabric.

Η χρήση μάσκας προτείνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και απόρριψης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: • Τραβήξτε απαλά τα δύο ειδικά λαστιχάκια και βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση • Εφαρμόστε τη μάσκα περνώντας τα λαστιχάκια πίσω από τα αυτιά και με το ειδικό έλασμα προσαρμοσμένο στο επάνω μέρος της μύτης • Πιέστε με τα δάχτυλά σας το έλασμα ώστε να προσαρμοστεί πλήρως στη μύτη σας • Καλύψτε τη μάσκα και με τα δύο σας χέρια για να ελιγώσετε τη στεγανότητά της

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το έλασμα για τη μύτη πρέπει να ξεδιπλωθεί πλήρως πριν φορέσετε τη μάσκα ώστε να εφαρμόζει απόλυτα στη μύτη σας χωρίς κενά.



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να φυλάσσεται σε χώρο σκοτεινό και δροσερό μακριά από υγρασία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ: • Εάν η μάσκα βραχεί, λερωθεί ή υποστεί βλάβη, ή εάν είναι δύσκολο να αναπνεύσετε δια μέσου της μάσκας • Εάν η μάσκα εκτίθεται σε πιτσιλιές, χημικών, μολυσματικών ουσιών ή υγρά σωματός • Εάν η μάσκα μετατοπιστεί από το πρόσωπο για οποιδήποτε λόγο • Εάν αγγίξετε το μπροστινό μέρος της μάσκας για να τη ρυθμίσετε • Η μάσκα πρέπει να αφαιρεθεί, ώστε παρέχεται φροντίδα εκτός του καθορισμένου ασθενούς με COVID-19.

Ακολουθήστε την ασφαλή διαδικασία αφαίρεσης και μην αγγίξετε το μπροστινό μέρος της μάσκας.

European Representative:
LGAJ Technological Center, S.A. (LPLUS)
Campus LIAB - Ronda de la - just del Centre s/n
08193 Santarista (Barcelona) Spain
T +34 93 567 20 00

Manufacturer: Xianhao Zhongyi Supply & Production Products Co., Ltd
No. 101 Xianyuan Road Xianhao City Hubei province China

BROS
TZEZANA

Εισάγεται από την ΑΦΟΙ ΤΖΕΖΑΝΑ Ε.Π.Ε.
Αθ. Τολύκου 72, 19300 Ασπρίδαργος, Αττική, Τηλ. 210 2653240, 210 2918729, www.cover.gr

BROS
TZEZANA

PROTECTIVE
FACE MASK

Προστατευτική
μάσκα προσώπου **FFP2 NR**
με φίλτρο προστασίας

> μιας χρήσης > πέντε στρώσεων > με λάστιχο

COVER PROTECT!
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ

COVER PROTECT!
EN 149:2001 + A1:2009 FFP2
CE 0370



> επιτρέπει την άνετη αναπνοή
> φιλική προς το δέρμα, ανθεκτική στην υγρασία

1 τεμ.



